

VALMASK

MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO DI TIPO IIR A 2 VELI DI SMS
TRIPLO STRATO CON EFFICIENZA DI FILTRAZIONE BATTERICA $\geq 98\%$

MATERIALE: SMS Thermobonded Nonwoven 100% Polipropilene

INDICAZIONI:

L'uso delle mascherine di tipo chirurgiche è indicato per evitare che chi le indossa contami l'ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi.

MODALITÀ D'USO

Per indossare correttamente la mascherina chirurgica è necessario:

- Lavarsi le mani;
- Sistemare la mascherina sul viso in modo da coprire naso e bocca;
- Inserire le dita in entrambi gli elastici e portare gli elastici dietro le orecchie;
- Tirare la mascherina chirurgica dall'alto e dal basso per aprire le pieghe e distenderla completamente sul viso;
- Modellare la barretta sul naso in modo da aver la massima adesione al viso;
- Mentre si indossa la mascherina evitare di toccare la mascherina con le mani e se proprio necessario effettuare il lavaggio prima e dopo aver toccato la mascherina;
- Una volta utilizzata rimuoverla senza toccare la parte esterna che potrebbe essere contaminata;
- Smaltire la mascherina nei rifiuti indifferenziati.



AVVERTENZE E MODALITÀ DI CONSERVAZIONE:

Conservare in luogo fresco e asciutto. Non esporre a luce solare diretta, luce UV e lampade fluorescenti. Si prega di utilizzare il prodotto entro il periodo di validità. Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato. Una volta indossata e utilizzata, la maschera chirurgica non può essere riutilizzata (MONOUSO).

CONFEZIONE DA XX MASCHERINE

DISPOSITIVO MEDICO
UNI EN ISO 14683 - IIR



0 767787 928216
Distribuito da: Società..
Via XXXXXX - CAP, Città (Prov) Stato

Fabbricante:

VALPHARMA INTERNATIONAL S.p.A
Via G. Morgagni, 2 - 47864 Pennabilli (RN) Italy



MM/AAAA

MM/AAAA

VPIWXXAAAA