



VALPHARMA INTERNATIONAL

SCHEDA TECNICA PRODOTTO
Mascherina Chirurgica Monouso a 2 veli di SMS Triplo strato Tipo IIR
“VALMASK”Rev 03 del 30/07/2020
Pag. 1 di 1

Nome prodotto	Mascherina Chirurgica Monouso “VALMASK”
Tipologia	Mascherina tipo chirurgico a 2 Veli di SMS triplo strato Tipo II R
Certificazione	Dispositivo medico CE di classe I ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modifiche.
Materiale	SMS (SPUNBOND + MELTBLOWN + SPUNBOND) Thermobonded Nonwoven 100% Polipropilene Hydrophobic – latex free non sterile
Confezione	Sacchetto in Politene contenente 20 o 50 mascherine richiudibile mediante zip
Colore	Bianco
Indicazioni e Modo d'uso	L'uso delle mascherine di tipo chirurgiche è indicato per evitare che chi le indossa contami l'ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi. Come indossarla: <ul style="list-style-type: none">• Lavarsi le mani;• Sistemare la mascherina sul viso in modo da coprire naso e bocca;• Inserire le dita in entrambi gli elastici (dalla parte esterna) e portare gli elastici dietro le orecchie;• Tirare la mascherina chirurgica dall'alto e dal basso per aprire le pieghe e distenderla completamente sul viso;• Modellare la barretta sul naso in modo da aver la massima adesione al viso;• Mentre si indossa la mascherina evitare di toccare la mascherina con le mani e, se proprio necessario, effettuare il lavaggio prima e dopo aver toccato la mascherina.• Una volta utilizzata, rimuoverla senza toccare la parte esterna che potrebbe essere contaminata;• Smaltire la mascherina nei rifiuti indifferenziati.
Avvertenze e modalità di Conservazione e scadenza	<ul style="list-style-type: none">• Si prega di utilizzare il prodotto entro il periodo di validità.• Conservare in luogo fresco e asciutto.• Non esporre a luce solare diretta, luce UV e lampade fluorescenti.• Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato.• Una volta indossata e utilizzata, la mascherina chirurgica non può essere riutilizzata (MONOUSO).• Il periodo di validità è di 36 mesi a decorrere dalla data di produzione, purché il prodotto sia correttamente conservato nella confezione di vendita originaria.

Test sul prodotto finito	Specifica	Riferimento / Metodo di prova
Aspetto	Mascherina di colore bianco a 2 veli di SMS in triplo strato con la presenza di un elastico su ciascun lato corto e la presenza di un nasello semirigido sulla parte superiore della mascherina.	Controllo visivo
Carico Biologico	Batteri aerobi mesofili, Funghi: ≤ 30 UFC/g	UNI EN ISO 11737-1:2018 UNI EN ISO 14683:2019